

Pulpotec 技术操作说明

使用方法:

按照常规方法使用 Pulpotec，无需橡胶坝。使用高速钻，以避免撕裂牙髓神经纤维根，并且小心去除所有的 cameral pulp。

1、 局部麻醉



然后，推荐两种方法把 Pulpotec 注入牙髓室。

传统方法

2、 使用外科钻头去除牙髓室内的牙根，碳化钨、FG（白色钻头），



3、 使用一个“Endo”钻头，碳化钨，FG（黄色钻头），从牙髓室切除活髓；



- 4、 使用菱形钻头“梨形” FG ISO018 塑形牙髓室；



- 5、 把 Pulpotec 液体和 Pulpotec 粉剂混合达到所需的乳脂状浓度的糊状。使用一个大号的填充棒（ISO 090）把糊状物注入牙髓腔。少量的出血不会影响 Pulpotec 的效果。使用糊剂前把牙髓腔在空气中晾干。



- 6、 用临时水泥封闭；



- 7、 在两牙弓面放置一个纱布卷，要求患者逐渐咬紧，使得 Pulpotec 糊能够黏附在腔壁和腔口；



- 8、 清除多余的水泥；



- 9、当第一层 Pulpotec 填入后（大约 7 小时），应该填充第二层（second session）。用海藻类或其他适当的材料紧密填充后，治疗结束。清除多余的临时水泥后，这可以直接放置在 Pulpotec 上面。留下一个薄的临时水泥中间层把 Pulpotec 和最后的封闭材料隔开。尽管不是完全必需的，还是推荐一个稳固的弥补，以保证紧密地封闭，坚固和长期效果




简单方法

另一种有效但是简单的方法把 Pulpotec 注入牙髓腔。在玻璃板上混合粉剂和液体，直到成为一个小的柔软的粘球。把粘球塑形成圆柱状，并且直接注入牙髓腔。用抹刀压入，然后，用临时水泥和纱布卷像前一种方法那样操作。

Kit PULPOTEC® 扩髓用的工具

用 Pulpotec® 封闭牙髓腔前，你所需要使用的成功扩髓的工具
这些小工具可以清除牙髓，而且可以避免撕裂牙髓纤维根

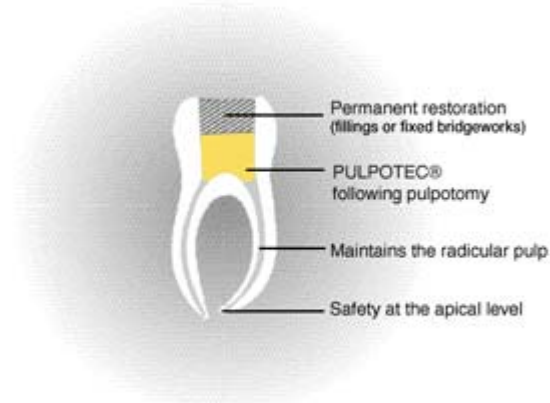

工具包括 4 种，按照顺序使用：

- 1、 外科钻头，碳化钨钻头，FG，（白色标记）——用来去除牙髓腔根
- 2、 “Endo” 钻头，碳化钨，FG，（黄色标记）——从牙髓腔内切断活髓
- 3、 菱形钻，“梨形”，FG，ISO 018 ——修整牙髓腔
- 4、 螺旋状填充工具，CA，ISO 090 ——向牙髓腔填充 Pulpotec

包装：四种工具