



____专门用于溶除牙胶尖，一分钟就可以把牙胶尖溶成水样物，便于取出！_____

使用方法:

- 1, 开髓后，用棉捻或塑料吸管将一滴药液滴送入根管内；
- 2, 保持约1分钟，使药液充分发挥作用，然后光用光滑髓针取出充填物，直到感觉根管已通畅并到达根尖；

牙胶尖溶除剂



瑞士牙科产品公司

____溶解塑化根充物的最佳选择____

使用方法:

- 1, 预备根管通路后，滴入一滴药液至髓腔；
- 2, 用探针或光滑髓针插入根管以帮助清洁根管；
- 3, 也可将浸有药液的棉条置于根管内，暂封；
- 4, 完全去除充填物可能需要两次就诊（间隔1-3天）；



塑化溶除剂

成汇嘉业公司将携当地代理商参加“华中口腔展”（武汉9月19-21日）及“第十一届山东国际口腔设备材料展览会”（济南舜耕展馆9月24-26日），欢迎莅临展位参观！

中国总代理：北京成汇嘉业公司



ISO国际认证产品

北京成汇嘉业公司



电话: 010-63877330 63420486
 传真: 010-63877244转606
 Email: humanfuture@vip.sina.com
 MSN: human_future@hotmail.com
 QQ: 929098079